

## DISICOV

Il sistema consente di porre fine al lavoro manuale degli operatori per la disinfezione delle ambulanze. Lavora per saturazione di ambiente, il metodo più sicuro per raggiungere ogni superficie, angolo, anfratto, interno dei cassetti e pensili, così come le attrezzature. Consente inoltre l'evidenza dell'efficacia e la traccia certificata della disinfezione eseguita.

## SICUREZZA

Il dispositivo riconosce se ci sono persone a bordo o finestrini e sportelli aperti, in tal caso il Disicov non si avvia finché l'area non sarà libera da persone e con sportelli e vetri chiusi.

## CONTROLLO

Disicov è in grado di verificare la compatibilità del flacone, e si attiva solo con il prodotto compatibile.

## ALLARMI

Al termine di ogni disinfezione, il sistema effettua una routine di controllo per appurare la quantità di liquido disinfettante ancora disponibile all'interno del flacone. Nel caso in cui la quantità di disinfettante NON sia sufficiente per effettuare una nuova disinfezione, il dispositivo avvierà un allarme sonoro e visivo ed invierà un messaggio (email) all'amministratore registrato. Il sistema resterà allarmato fino a quando non si preme il pulsante sul dispositivo e non sarà sostituito il flacone vuoto.

## TRACCIA

Disicov genera un documento digitale ad ogni disinfezione avvenuta. Il documento riporta tutti dati del dispositivo, del trattamento effettuato e del mezzo sul quale è installato. Il documento è visionabile e scaricabile da dispositivo mobile mediante un QR-CODE applicato all'interno dell'ambulanza.

## ARCHIVIO IN CLOUD

Niente più carta, tutta la documentazione generata dal sistema ogni giorno viene archiviata su un server in CLOUD per essere sempre disponibile e, consultata ovunque voi siate dal vostro dispositivo mobile. Server ridondanti assicurano il backup giornaliero dei documenti così da non perdere mai nulla e renderli disponibili alle autorità competenti in caso di controllo.

## CONTENUTO DISICOV

Dispositivo atomizzatore, alimentatore 12Volt, beccuccio orientabile, etichetta ambiente TAG RFID, chiave di chiusura, dima di foratura.

Fornito completo di 6 flaconi di PEROX disinfettante da lt.1 (sufficiente per circa 400 sanificazioni).

## DIMENSIONI ESTERNE (espresse in mm)

Larghezza 197 - Profondità 197 - Altezza 400


## CARATTERISTICHE

Erogazione prodotto: 25 ml/minuto.

Quantità di prodotto necessaria: 1 ml per ogni m<sup>3</sup>.

Dimensione massima ambiente: 1000 m<sup>3</sup>.

Dispositivo Conforme CE ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute: direttiva 2006/42/CE – Direttiva 2014/30/UE – ENISO 12100:2010.

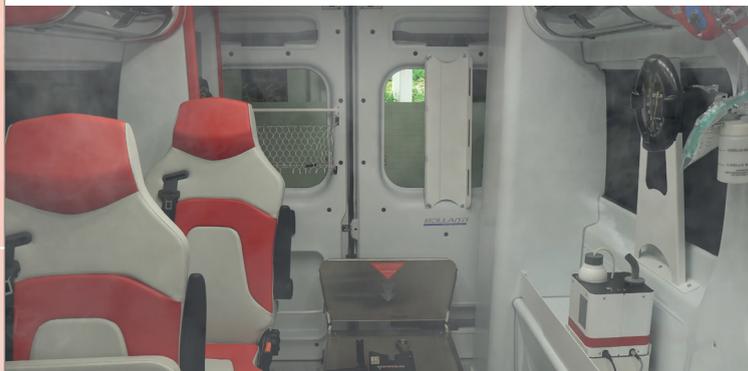

# DISICOV

Per maggiori informazioni contattare:

TEL: +39 0773 258256

MAIL: vendite@integraitaly.it

# DISINTEGRA il Covid

Dispositivo automatico per la disinfezione dell'ambulanza

## SANIFICA • TRACCIA • CERTIFICA



# DISICOV

# Disinfezione automatica



## Attivazione manuale

Disicov è attivabile mediante centralina in cabina guida e/o pulsante sul dispositivo stesso.

## Attivazione automatica

Il sistema è programmabile con attivazione automatica nei giorni e orari a scelta, senza limite sul numero di trattamenti quotidiani.

## Durata

Il trattamento ha una durata di soli **120 secondi**. (l'accesso nel comparto sanitario e nella cabina guida è possibile dopo 15 minuti dalla fine del ciclo di disinfezione).

# Efficacia dimostrata 99,9%

## Disinfezione totale

Disicov aerosolizza il disinfettante PEROX (in flaconi da 1 litro), la formula di PEROSSIDO D'IDROGENO ha una concentrazione di acqua ossigenata al 20%.

Biocida o PMC autorizzato e certificato dal Ministero della Salute con parere positivo dell'Istituto Superiore di Sanità.

## Efficacia

- Battericida E Microbattericida;
- Tuberculicida;
- Fungicida;
- Sporicida;
- Virucida.

# Documento di tracciabilità



Un **QR-CODE** è applicato sulla parete interna dell'ambulanza e permette a chiunque di scaricare il documento tramite smartphone:

- *Certificato di avvenuto trattamento;*
- *Tipo, durata ed esito dell'intervento;*
- *Data e ora di esecuzione della disinfezione;*
- *Numero di targa ambulanza e proprietà;*
- *Numero seriale del dispositivo;*
- *Lotto e scadenza del prodotto disinfettante;*
- *Scheda di sicurezza disinfettante;*
- *Firma del responsabile del protocollo;*
- *Firma del responsabile tecnico.*

